

LET'S MAKE  
ROOM FOR  
PEOPLE

PRESSALIT®



## Pressalit MATRIX höhenverstellbarer und seitlich verschiebbarer Waschtisch

Flexible, anpassbare Lösungen im Badezimmer verbessern die Bedürfnisse der Benutzer und des Pflegepersonals erheblich. Funktionalität, Sicherheit und Arbeitsumgebung stehen bei der neuen höhenverstellbaren und seitlich verschiebbaren Waschtischlösung von Pressalit im Vordergrund.

Die neue Lösung unterstützt die Selbstständigkeit, die Optimierung der Raumfläche und vor allem das Gefühl der Sicherheit im Badezimmer. Ob zu Hause, in einem Pflegeheim, einer Einrichtung oder einem Krankenhaus.

NEU



#### Funktionalität mit zahlreichen Möglichkeiten

Die neue höhenverstellbare und seitlich verschiebbare Waschtischlösung von Pressalit ist das Nonplusultra in Sachen Funktionalität und Hygiene. Sie besteht aus einem Waschtisch-Lifter und einem Waschbecken und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Sie können den Platz im Badezimmer optimieren und gleichzeitig die sich ändernden Bedürfnisse des Benutzers und des Pflegepersonals berücksichtigen. Die Nutzungsmöglichkeiten sind unbegrenzt. Je nach Bedarf können Sie zwischen manuellem oder elektrischem Betrieb wählen.

#### Hygiene im Mittelpunkt

Die einzigartige Verkleidung unseres neuen seitlich verschiebbaren Waschtischs umschließt die gesamte Elektronik und die mechanischen Teile, sodass nichts sichtbar ist. Dies gewährleistet eine sehr hygienische Lösung, bei der die Verkleidung fest am Waschtisch anliegt und dicht an der Wand verläuft.

Dadurch können Schmutz und Dreck nicht in schwer zugängliche Bereiche eindringen. Gleichzeitig erleichtert es die Reinigung und reduziert das Risiko der Ausbreitung von Bakterien.

Für den Einsatz in Krankenhäusern ist auch ein spezieller hygienischer Stöpsel erhältlich, der die Reinigung erleichtert und das Infektionsrisiko verringert.

#### Optimale Platznutzung

Durch die Möglichkeit, den Waschtisch im Badezimmer zu verschieben, können Sie den verfügbaren Platz optimal nutzen und im besten Fall die entscheidenden Quadratmeter in einer Wohnung oder einem Zimmer gewinnen.

So kann beispielsweise der Waschtisch vom WC entfernt werden, um Platz für das Pflegepersonal zu schaffen, oder näher an das WC gerückt werden, um Platz für den Dusch- und Badebereich zu schaffen. Der bewegliche Waschtisch sorgt außerdem dafür, dass Sie sich mit einem Rollstuhl besser im Badezimmer bewegen können.

#### Die Innovation, die viele Bedürfnisse erfüllt

Der Waschtisch kann sowohl horizontal als auch vertikal verschoben werden, um den individuellen Bedürfnissen und dem Platzbedarf gerecht zu werden. Der Waschtisch ist auch ideal für verschiedene Benutzer. Vor allem die elektrische Version bietet eine einfache Höhenverstellung. Außerdem kann jeder das Becken leicht zur Seite schieben, selbst wenn er eine eingeschränkte Funktion der Hände und Finger hat.

Die einfache Verschiebung und Anpassung des Waschtischs erleichtert zudem die Arbeit des Pflegepersonals und ermöglicht einen schonenderen Arbeitsablauf.

„ Mit anpassbaren und flexiblen Lösungen im Badezimmer wird es möglich, Zeit und Raum für mehr Privatsphäre im Alltag zu schaffen. Die richtigen Hilfsmittel verbessern ganz einfach die Lebensqualität.

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

### Ein echter Mehrzweckwaschtisch

- Einfachere Körperpflege für den Nutzer
- Verstärkte Ausrichtung auf Eigenständigkeit
- Optimale Platzausnutzung in kleinen Badezimmern
- Zeitsparendes Hilfsmittel für das Pflegepersonal
- Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal





#### Die ideale Lösung für die Pflegesituation

Die neue Waschtischlösung von Pressalit ist die optimale Entscheidung in Pflegeheimen, Einrichtungen und Krankenhäusern, in denen eine individuelle Anpassung an den Benutzer oder das Pflegepersonal erforderlich ist, und das oft mehrmals täglich. Je selbstständiger der Nutzer ist, desto mehr Zeit bleibt für andere Aufgaben. Gleichzeitig stehen das Arbeitsumfeld und die Hygiene im Mittelpunkt.

#### Anpassungsfähige Lösungen verbessern die Lebensqualität

Manche Menschen sind im Bad auf viel Hilfe angewiesen, andere brauchen nur ein wenig oder gar keine. Und manchmal ändern sich die Bedürfnisse im Laufe des Tages. Dies stellt hohe Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit der Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden müssen.

Eine flexible Lösung, die die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers zu einem bestimmten Zeitpunkt berücksichtigt, trägt dazu bei, Situationen zu schaffen, die die Selbstständigkeit stärken und ein höheres Maß an Freiheit ermöglichen. Für manche Menschen besteht auch die Möglichkeit, mehr von ihrer persönlichen Pflege selbst zu übernehmen.

#### Optimale Arbeitsbedingungen schaffen

Anpassungsfähige Lösungen im Badezimmer sind ein klarer Vorteil für den Nutzer und eine wertvolle Hilfe für die Pflegekraft, die täglich wechseln kann. Hier trägt die Möglichkeit, unter anderem die Höhe zu verstellen, entscheidend zu einer guten Arbeitsposition bei.

In einem Altenheim oder Krankenhaus beispielsweise hat dies mehrere positive Nebeneffekte. Mit dieser sicheren und flexiblen Lösung entlastet der selbstständige Bewohner oder Patient das Pflegepersonal. Sie schafft bessere Bedingungen und damit eine bessere physische Arbeitsumgebung mit weniger Arbeitsunfällen.

#### Benutzen Sie den Waschtisch dort, wo immer Sie ihn brauchen

Ein seitlich verschiebbarer Waschtisch schafft bei Bedarf den nötigen Platz um das WC herum. Auf diese Weise lässt sich ein Rollstuhl leichter manövrieren und in Badezimmern, in denen mehr Platz benötigt wird, verbessert die Möglichkeit, den Waschtisch zu verschieben, sowohl das Arbeitsumfeld als auch die intime Situation, die mit einem Badezimmer verbunden ist.

Wenn der Waschtisch als Hilfsmittel für den Übergang vom Rollstuhl zum WC oder umgekehrt verwendet wird, ist es wichtig, dass der Abstand zwischen dem Waschtisch und dem WC angemessen ist und dass er sich leicht an die Situation anpassen lässt.

Der Waschtisch lässt sich in wenigen Sekunden mit einem einzigen Knopfdruck seitlich verschieben. Auf diese Weise können Sie effizient und einfach den nötigen Platz für eine Aufgabe gewinnen – rund um das WC oder im Duschbereich.

Der Waschtisch kann mühelos und mit geringem Kraftaufwand bewegt werden. Dies kann sogar mit der Außenseite der Hand ausgeführt werden, wenn der Benutzer eine eingeschränkte Funktion seiner Hände und Finger hat.


#### Hygienische Funktionalität der Spitzenklasse

Die Kombination aus funktionalen und hygienischen Eigenschaften macht diesen höhenverstellbaren und seitlich verschiebbaren Waschtisch zur optimalen Wahl für alle Umgebungen, in denen optimale Bedingungen für Benutzer und Pflegepersonal von größter Bedeutung sind. Die beweglichen Bestandteile des Waschtisches und der Waschtischhalterung sind hinter einer Verkleidung verborgen, die dicht an der Wand entlang läuft und sich eng an den Waschtisch anschmiegt. So wird verhindert, dass sich Staub und Schmutz an schwer zugänglichen Stellen festsetzen.

Alle Oberflächen sind groß und glatt und lassen sich leicht abwischen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Waschtisch ohne Überlauf zu wählen und für Krankenhäuser, einen speziellen Stöpsel zu verwenden. Dies erleichtert die Reinigung und verringert das Risiko einer übermäßigen Schmutzansammlung, wodurch das Risiko einer Infektion verringert wird.

„Gute Hygiene und einfache Reinigung sind entscheidende Faktoren für Mobilitätshilfen. Bei der neuen MATRIX-Waschtischlösung schmiegt sich die Verkleidung eng an den Waschtisch an und verläuft dicht an der Wand entlang.“

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

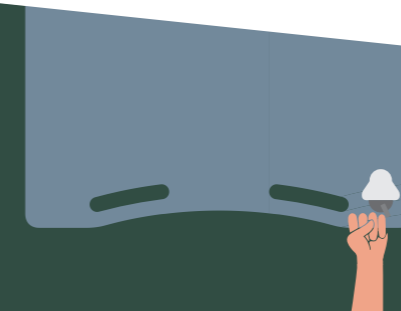

Einfache Bedienung und leicht zugängliche Betätigungstaste – auch für kraftlosere Hände.



#### Mehr Benutzer erfordern mehr Einstellungen

In einem Privathaushalt gibt es in der Regel mehrere Nutzer eines Badezimmers mit unterschiedlichen Bedürfnissen und körperlichen Fähigkeiten. Dadurch erfordert jede Nutzung des Badezimmers verschiedene Einstellungen.

Wenn es in einem Haus sitzende und stehende Nutzer gibt, ergibt sich ein natürlicher Höhenunterschied. Daher ist eine flexible und anpassbare Lösung vorzuziehen. Das macht es einfach, sich auf bestimmte Bedürfnisse und Situationen einzustellen.

#### Flexibilität für die gesamte Familie

Eine der wichtigsten Einrichtungen im Badezimmer ist das Waschbecken. Hier findet ein Großteil unserer täglichen Pflege statt. Es ist deshalb wichtig, dass Sie das Waschbecken optimal nutzen können – nicht nur zum Rasieren, Schminken oder Zähneputzen, sondern auch, um Stürze zu vermeiden.

Die integrierten Griffe sind eine Hilfe beim Aufstehen nach und es ist möglich, sich die Hände im Sitzen zu waschen, bevor Sie in einen Rollstuhl umsteigen.

Mit anderen Worten: Es gibt viele Dinge, die bei der Planung eines Badezimmers in einem Privathaushalt zu berücksichtigen sind. Angefangen bei der Optimierung des Platzangebots im vorhandenen Badezimmer bis hin zu der Frage, welche Lösungen am besten zu den bestehenden und sich mit der Zeit entwickelnden Bedürfnissen passen.

#### Einfache Einstellung – elektrisch oder manuell

Das Waschbecken sollte sich leicht an die Bedürfnisse aller Familienmitglieder anpassen lassen. Und jeder sollte dies können. Der neue höhenverstellbare und seitlich verschiebbare Pressalit MATRIX Waschtisch ist mit zwei Verstellmöglichkeiten erhältlich: elektrisch oder manuell.

Leben Sie allein oder haben die Bewohner Ihres Zuhauses die gleichen Bedürfnisse, ist ein System mit manueller Höhenverstellung, bei dem eine Regulierung nur selten erforderlich ist, eine gute Lösung. Wenn es jedoch mehrere Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt, ist eine einfache und schnelle elektrische Einstellung vorzuziehen.


#### Verschieben des Beckens in Sekundenschnelle

Der Waschtisch wird seitlich verschoben, indem Sie eine leicht zugängliche Funktion an der Unterseite des Beckens betätigen. Das Verschieben des Waschtischs und der Waschtischhalterung dauert nur wenige Sekunden und kann sicher mit nur einer Hand durchgeführt werden. Der Benutzer kann daher den Waschtisch sowohl zum Umsteigen als auch zum Händewaschen verwenden, während er auf der Toilette sitzen bleibt.

Er ist leichtgängig und erfordert nur sehr wenig Kraft in den Händen, sodass in der Regel Benutzer und Pflegeperson den Waschtisch bequem bewegen können – nur mit der Außenseite der Hand. Sobald der Betätigungsknopf losgelassen wird, wird der Waschtisch in dieser Position arretiert. Dies stellt sicher, dass sich der Waschtisch nicht weiter bewegt, bevor er wieder verschoben werden soll.

„Im Privathaushalt erfordern die wechselnden Bedürfnisse der Bewohner eine hohe Flexibilität der Hilfsmittel in einem Badezimmer.“

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

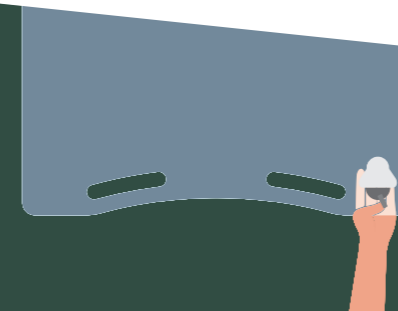

Verschieben Sie den Waschtisch ohne Aufwand mit nur einem Knopfdruck. Der Waschtisch rastet ein, sobald der Knopf losgelassen wird.

## PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Seit 1954 designen, entwickeln und produzieren wir hochwertige WC-Sitze. Zusätzlich stellen wir seit 1975 auch Produkte für den senioren- und/oder behinderten gerechten Badbereich sowie höhenverstellbare Küchen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität her. All dies macht uns zu einem weltweit führenden Hersteller im hochwertigen Badbereich. Erstklassiges, einwandfreies Design und zuverlässige Funktionalität sind die Hauptmerkmale unserer breiten Produktpalette.

### Pressalit GmbH

Ramskamp 71-75  
25337 Elmshorn, Deutschland  
T: +49 4121 78887 0  
de@pressalit.com

### Pressalit A/S

Pressalitvej 1  
8680 Ry, Dänemark  
T: +45 8788 8788  
F: +45 8788 8789  
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com



## WÄHLEN SIE DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Die höhenverstellbare und seitlich verschiebbare Pressalit MATRIX Waschtischlösung besteht aus einer Waschtischhalterung und dem dazugehörigen Waschtisch. Die Waschtischhalterung ist mit einem MATRIX MEDIUM oder MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch erhältlich, sodass Sie den Waschtisch wählen können, der am besten zum Badezimmer und den spezifischen Bedürfnissen passt. Der Waschtisch kann in der Höhe und seitlich verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt je nach Modell entweder manuell oder elektrisch. Die Gesamtlänge der Verstellung beträgt 500 mm seitlich und 300 mm in der Höhe.



Waschtisch mit **manueller** Höhenverstellung und Pressalit MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch.

Dieses Modell:  
Waschtisch-Lifter: R484219000  
Waschtisch: R2142112000



Waschtisch mit **elektrischer** Höhenverstellung und Pressalit MATRIX MEDIUM Waschtisch.

Dieses Modell:  
Waschtisch-Lifter: R482219000  
Waschtisch: R2122000

## PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



WE SUPPORT



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA